


**fasciotens® Hernia**

patobulintos fasciotens® Carrier

# Naudojimo instrukcijos

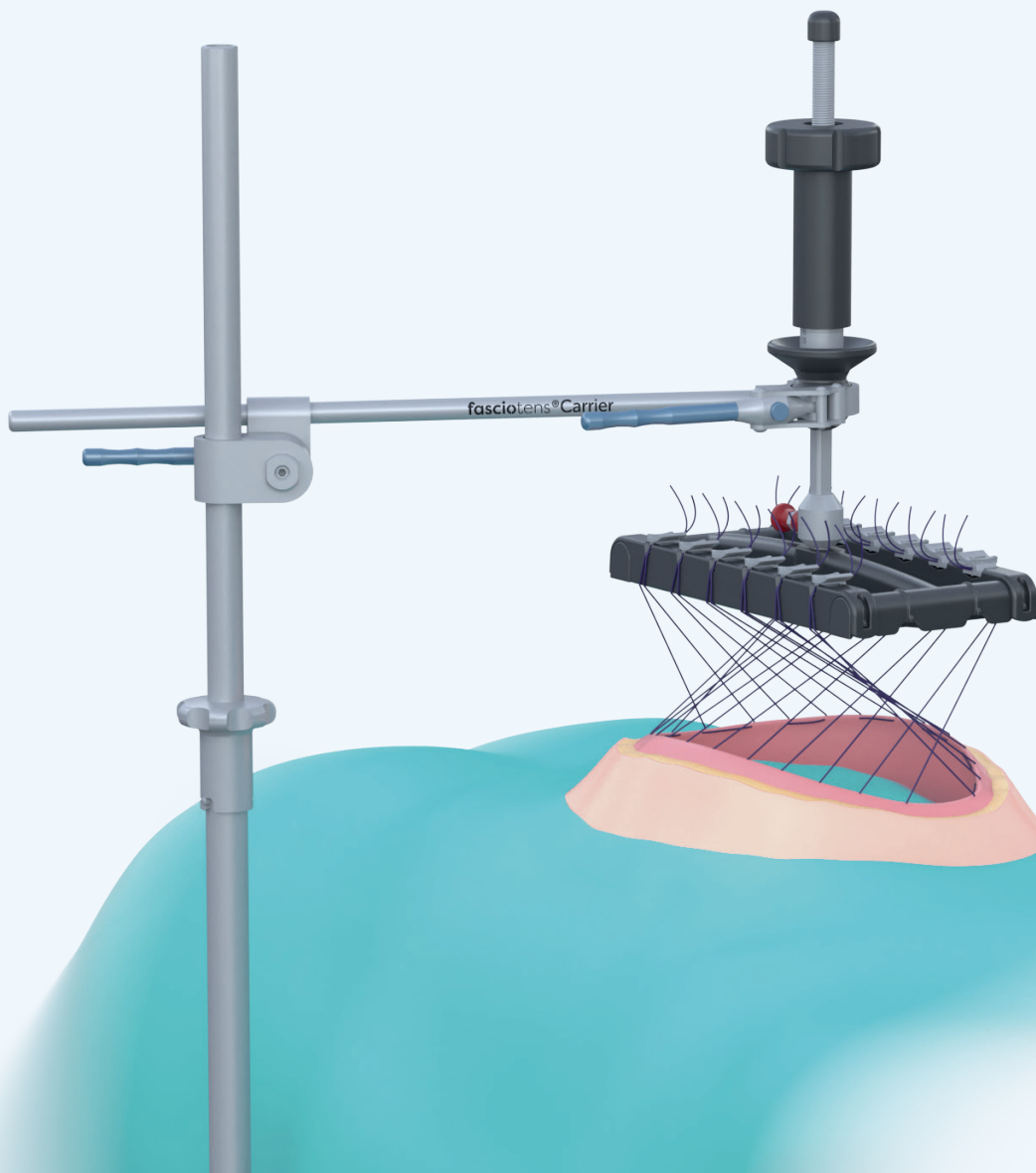

**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

[www.fasciotens.de](http://www.fasciotens.de)

## Gerb. kliente,

džiaugiamės, kad pasirinkote „fasciotens®Hernia“ – novatorišką atviros pilvo srities gydymo būdą. „fasciotens®“ gaminiai suteikia aukščiausią kokybę, saugumą ir naujausias technologijas. Gaminys buvo sukurtas dėl medicininės būtinybės ir buvo sukurtas bendradarbiaujant su praktikuojančiais chirurgais.

Siekiant visapusiškai išnaudoti gaminio eksploatacines savybes ir užtikrinti sėkmingą naudojimą, prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir naudokitės jomis. Be to, visada laikykitės standartinių bendrųjų darbo saugos priemonių, konkrečių SVP ir taikomų norminių reikalavimų. Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.



*Apie rimtus incidentus, susijusius su gaminiu, būtina nedelsiant pranešti „fasciotens GmbH“ ir kompetentingai nacionalinei institucijai.*



*Medicinos prietaisą gali naudoti tik profesionalai. Įsitikinkite, kad visi gaminį naudojančys asmenys perskaitė ir suprato naudojimo instrukcijas.*

**Laikykite naudojimo instrukcijas saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte jas bet kada pasiekti.**



**Įmonės adresas:**

fasciotens GmbH  
Moltkeplatz 1  
D-45138 Essen,  
Vokietija

Tel. +49 (0)201 99 999 630  
Faks. +49 (0)201 99 999 639  
El. paštas: [info@fasciotens.de](mailto:info@fasciotens.de)  
Interneto svetainė: [www.fasciotens.de](http://www.fasciotens.de)

**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

## Mokomoji vaizdo medžiaga



<https://www.fasciotens.de/wl-hernia-carrier-ifu-video-en>

**Prieš naudodamas gaminį naudotojas turi peržiūrėti visą  
vaizdo įrašo instrukciją.**

# Turinys

<b>Jūsų saugumui</b> .....	<b>5</b>
<b>Paskirtis, indikacijos ir kontraindikacijos</b> .....	<b>6</b>
<b>Pastabos apie šalutinį poveikį ir riziką</b> .....	<b>7</b>
<b>Gaminio struktūra</b> .....	<b>7</b>
<b>Paciento paruošimas</b> .....	<b>9</b>
Chirurginė prieiga prie fascijos .....	9
Chirurginių siūlų chirurginis tvirtinimas .....	9
<b>Surinkimas ir sulygiavimas</b> .....	<b>10</b>
„fasciotens®Hernia“ siūlų laikiklio pritvirtinimas ir nuėmimas .....	12
Išankstinio įtempimo valdiklis .....	14
Siuvimo medžiagos pritvirtinimas ir nuėmimas nuo siūlų laikiklio .....	15
<b>Įtempimo jėgos reguliavimas</b> .....	<b>17</b>
<b>Gaminio struktūra</b> .....	<b>19</b>
<b>Pakartotinis apdorojimas / sterilizavimas</b> .....	<b>20</b>
<b>Šalinimas</b> .....	<b>20</b>
<b>Garantija</b> .....	<b>21</b>
<b>Pagalba</b> .....	<b>21</b>
<b>Naudojami grafiniai simboliai</b> .....	<b>22</b>
<b>Įspėjimų žodynėlis</b> .....	<b>23</b>

## Jūsų saugumui

### Laikykitės naudojimo instrukcijų

Bet koks gaminio paleidimas ir tvarkymas reikalauja tikslių žinių ir šių naudojimo instrukcijų laikymosi. Gaminys skirtas naudoti tik aprašytam tikslui.

Šiame vadove ypač svarbios pastabos paryškintos taip:



#### ***Įspėjimas!***

*Tai įspėjimas, nurodantis rizikos situacijas ir pavojus.*

*Nesilaikant šio įspėjimo gali kilti pavojus gyvybei.*

***Šių įspėjimų būtina laikytis.***



#### ***Informacija!***

*Tai informacija, nurodanti tam tikras charakteristikas, kurių reikia laikytis.*

### Atsakomybė už veikimą ir žalą

Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo, bet koku atveju taikoma operatoriui ar naudotojui, jei gaminį naudoja asmenys, kurie nėra specialistai, turintys tinkamą kvalifikaciją dirbti su gaminiu, ir nėra gavę jo naudojimo instrukcijų. Be to, atsakomybė taikoma naudotojui, jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Prieš naudojant gaminį reikia patikrinti, ar jis nepažeistas ir nieko netrūksta.

**fasciotens GmbH** pardavimo ir pristatymo sąlygų garantijos ir atsakomybės sąlygos nėra pratęsimos dėl ankstesnės ir vėlesnės informacijos.



*Užtikrinkite, kad naudojimo instrukcijos būtų visada prieinamos ir kad jos būtų perskaitytos ir suprastos.*

# Paskirtis, indikacijos ir kontraindikacijos

## Paskirtis

Numatyta „fasciotens®Hernia“ paskirtis yra užkirsti kelią fascijos atitraukimui atvirame pilve ir ištempti pilvo sieną / fasciją esant esamam ar buvusiam pilvo sienos / fascijos praradimui. fasciotens®Hernia yra Is klasės (sterilus) medicinos prietaisas ir naudojamas kartu su fasciotens®Carrier.

Gaminys skirtas tik žmonių medicininiams tikslams ir naudojamas per operaciją. Gaminį galima naudoti tik kartu su „fasciotens®Carrier“.



*Gaminys buvo patvirtintas naudoti tik su „fasciotens®Carrier“. Gamintojas neleidžia derinti su kitomis įtempimo sistemomis.*

## Indikacijos

Tipinės indikacijos, tinkančios kombinuotai procedūrai, kai naudojami tiek pilvo sienos tempimo produktai, gali būti didelės ir sudėtingos pirminės pilvo sienos išvaržos ir pjūvio išvaržos, kurių metu dėl pilvo sienos struktūrų lateralizacijos galima pasiekti tik pirminį, mažos įtampos uždarymą, naudojant hibridines procedūras. Tai apima:

- Išvaržos po laparostomijos
- Pirminės išvaržos ir randų išvaržos
- Išvaržos praradus domeną
- Florido tinklinės infekcijos be tinkamo uždarymo galimybės (galbūt siekiant išvengti aloplastinių medžiagų)

## Kontraindikacijos



*Naudojimą gali riboti vietiniai veiksniai naudojimo srityje ir bendra paciento būklė!*

Vietiniai veiksniai:

- Nekrozinis arba mechaniškai nestabilus fascijos audinys
- Neišsprendžiami pilvo organų sukibimai su pilvo siena

Bendrieji veiksniai:

- Nepakankamas atstumas iki prietaiso, pvz., dėl kūno stambumo
- Nėštumas
- Amžius ≤10 metų

## Pastabos apie šalutinį poveikį ir riziką

Naudojant gaminį, per trumpą ar ilgą laiką gali pasireikšti šie nepageidaujami šalutiniai poveikiai: Fascijos pažeidimas (bendras specifinis gydymo šalutinis poveikis, kuris nėra būdingas gaminiui)

## Pacientų tikslinės grupės


Suaugę pacientai, kuriems diagnozuota pirminė pilvo sienos išvarža, kurios negalima uždaryti esant mažam įtempimui. Daugiausia pacientai, kurių sveikatos būklė stabili.

## Numatyti naudotojai

Chirurgai, turintys patirties pilvo chirurgijos srityje (pvz., bendrosios, vidaus organų, kraujagyslių ir traumų chirurgijos), sveikatos priežiūros ir slaugos personalas (išmokytas dirbti operacinėje steriliomis sąlygomis).


## Gaminio struktūra

fasciotens®Hernia skirta naudoti tik su fasciotens®Carrier. Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas gaminio fasciotens®Hernia naudojimas kartu su fasciotens®Carrier.

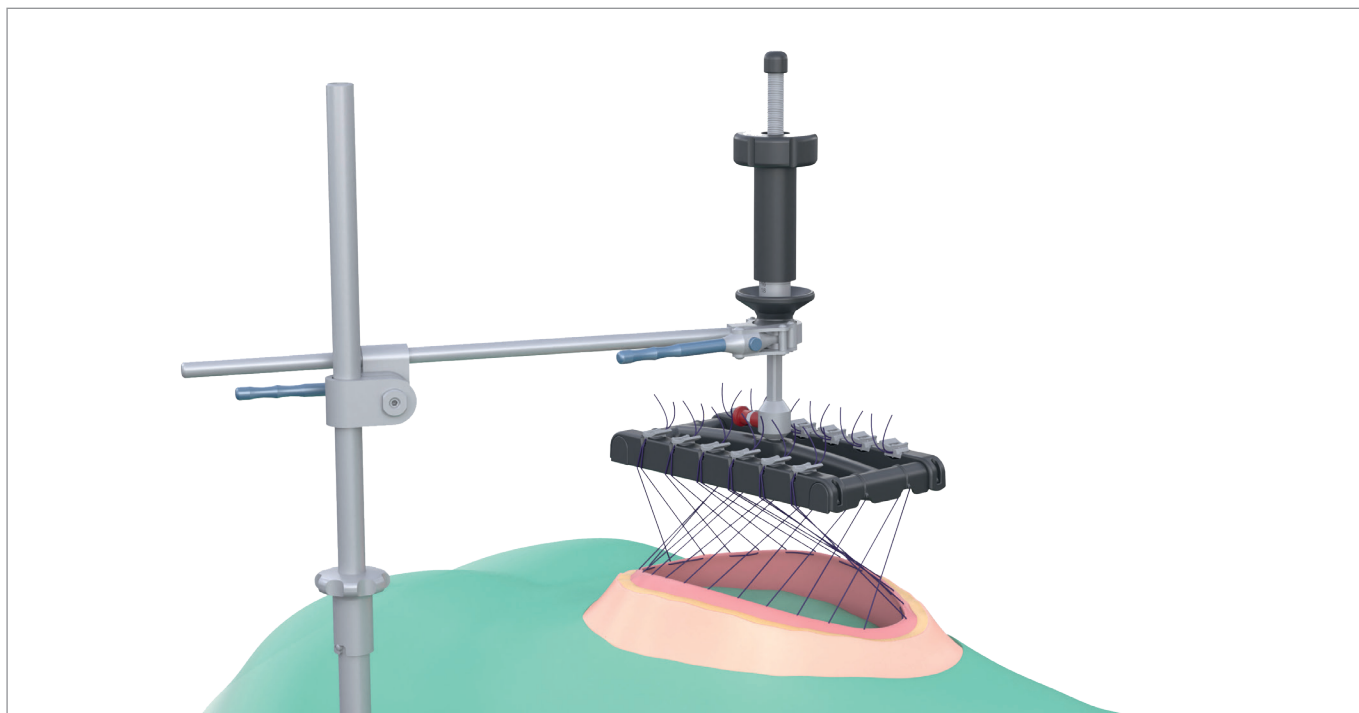

Be to, laikykitės fasciotens®Carrier naudojimo instrukcijų.

fasciotens®Hernia susideda iš dviejų modulių:

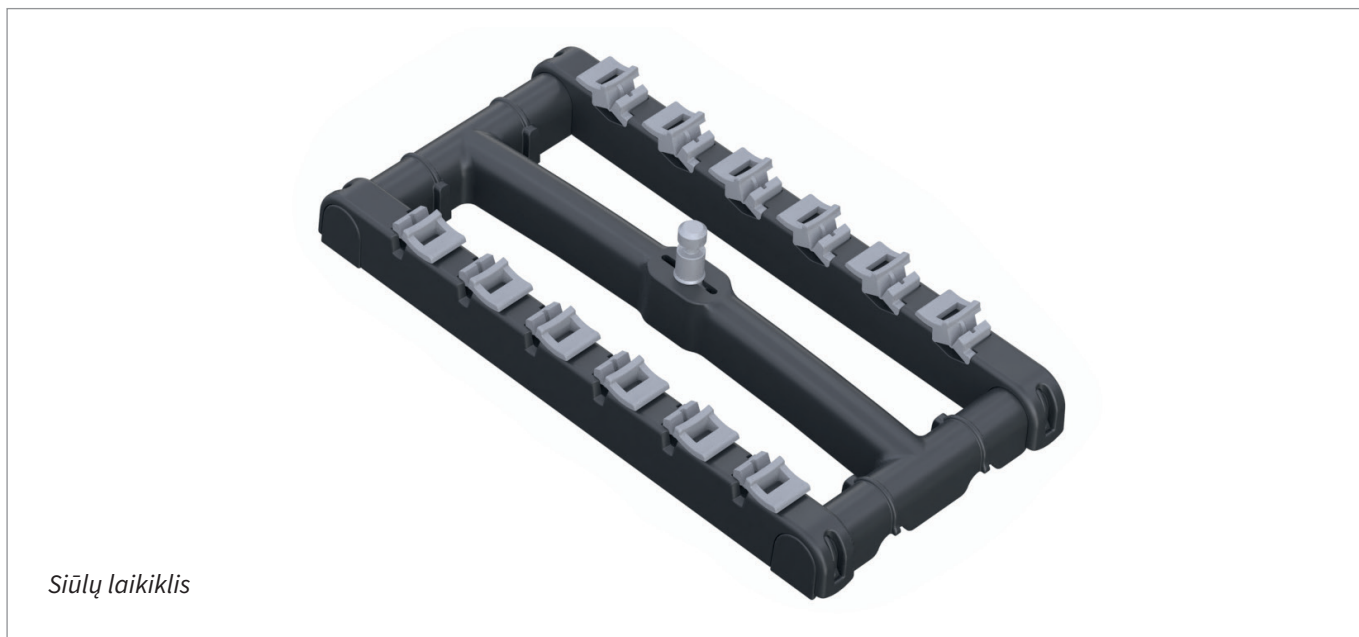

*Jei prieš naudojant fasciotens®Hernia pastebima, kad sterili pakuotė yra pažeista, gaminio naudoti nebegalima. Kreipkitės į gamintoją.*



*fasciotens®Hernia ir fasciotens®Carrier galima naudoti tik sterilius. fasciotens®Hernia gamintojas tiekia sterily ir jį galima naudoti operacinėje be išankstinės sterilizacijos.*



## Paciento paruošimas

### Chirurginė prieiga prie fascijos



Dėl anatomicinės situacijos ir atitinkamų išvadų chirurginis pilvo ertmės atidarymas ir su tuo susijęs priėjimas prie tiesiojo pilvo raumens fascijos reikalauja ypatingo chirurgo atidumo ir chirurginės patirties. Prieš pradėdant įtempti, reikia laisvai paruošti išvaržos maišelį ir sukurti prieigą prie pilvo sienos fascijos.



*Reikia patikrinti tą vietą, ar pilvo organai nėra prilipę prie pilvo sienos. Priešingu atveju, įtemptant už pilvo sienos, gali plyšti prilipę organai.*

### Chirurginių siūlų chirurginis tvirtinimas

Ventraliai su „fasciotens®Hernia“ taikomas įtempimas iš viso per 12 chirurginių siūlų, kurie panašiais intervalais paciento pusėje pritvirtinami prie fascijos ir užfiksuojami siūlų laikiklyje prietaiso pusėje. Siūlai turi būti susiuvami U formos siūle taip, kad naudojant 6 siūlus kiekvienoje fascijos pusėje, kiekvienoje fascijos pusėje susidarytų 12 sujungimo taškų. Tai reiškia, kad įtempimo jėga yra pakankamai paskirstyta per 24 taškus.

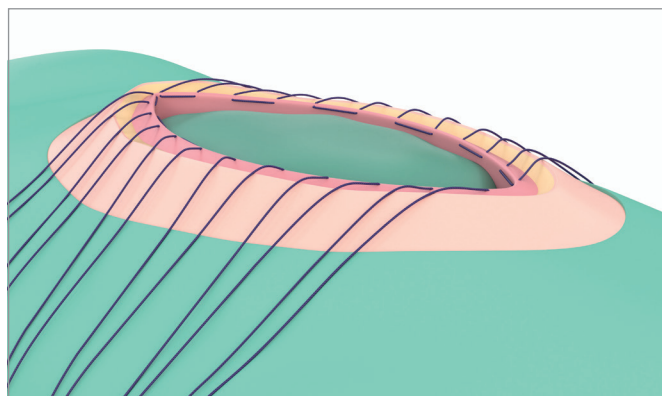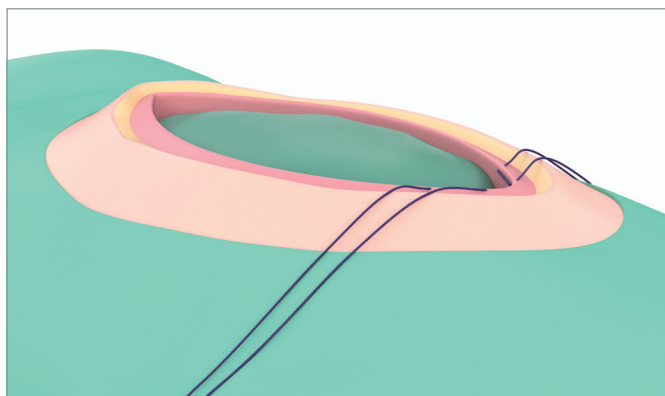

Ši procedūra rekomenduojama chirurginiams siūlams tvirtinti prie fascijos. Procesas turi būti pakartotas dvylika kartų.

1. Perkiškite siūlą per fasciją iš išorės.
2. Vėl siūkite siūlą U formos siūle iš vidaus į išorę (atstumas apie 2–3 cm).
3. Sulygiuokite siūlą taip, kad jis būtų vienodo ilgio abiejose pusėse (maždaug 25 cm).





*Būtina naudoti polifilamentinių siūlų medžiagą (USP 2), kad siūlai tinkamai laikytųsi.*



## Surinkimas ir sulygiavimas

Norėdami pritvirtinti fasciotens®Hernia prie fasciotens®Carrier, atlikite šiuos veiksmus:



- 1. Atleiskite skersinio rutulinį laikiklį** kartu paspausdami ir laikydami spaudžiamosios svirties mygtuką ir patraukdami spaudžiamąją svirtį.

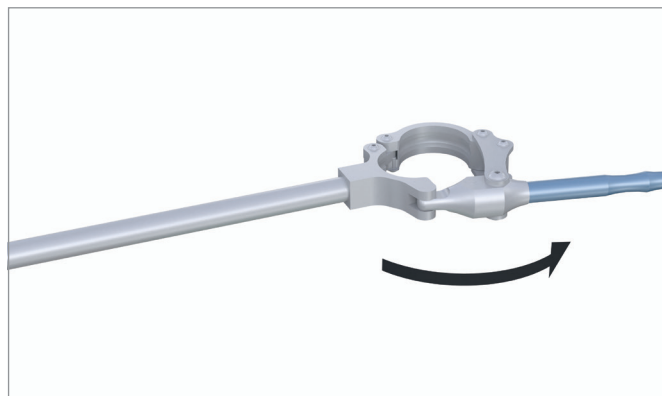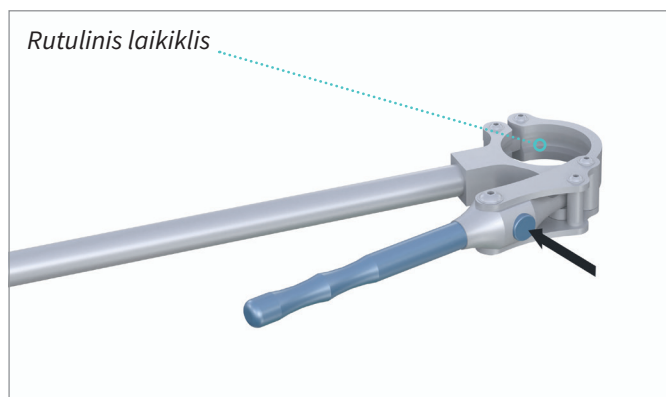

- 2. Įkiškite įtempimo valdiklį su raudonu fiksavimo varžtu priekyje į rutulinį laikiklį iš viršaus.** Rutulinis adapteris turi būti įdėtas į rutulinį laikiklį per vidurį.

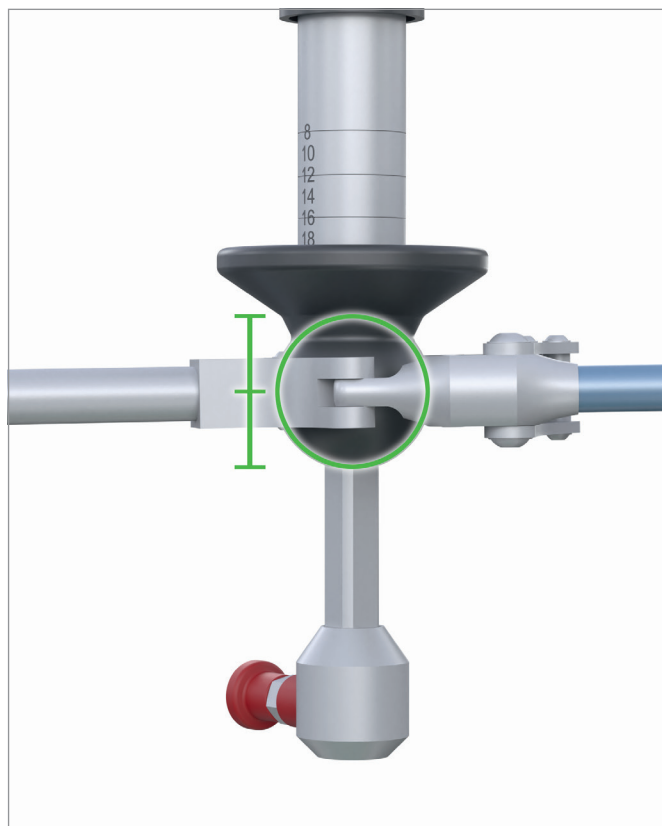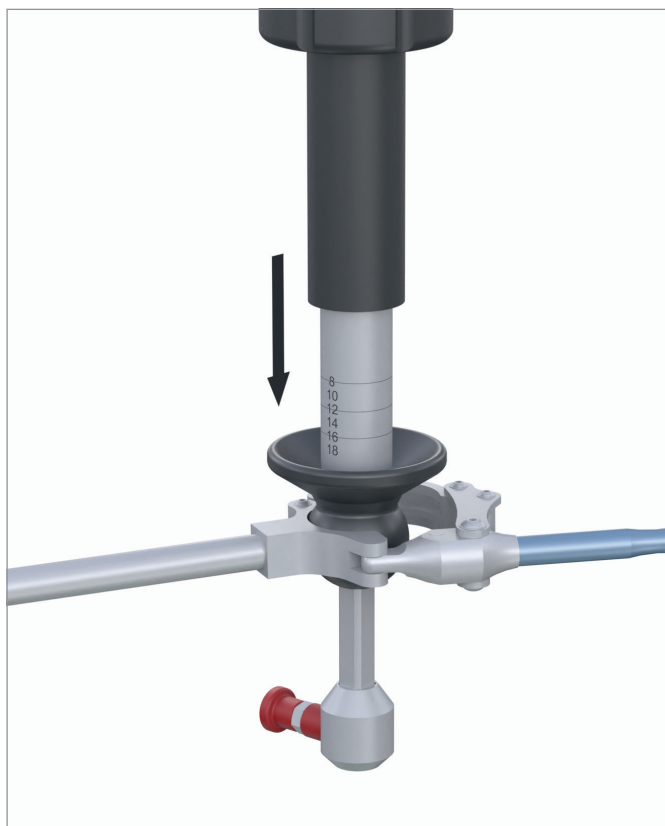

**3. Pritvirtinkite rutulinį adapterį įkišdami jį į rutulinį laikiklį ir uždarydami spaudžiamąją svirtį.**

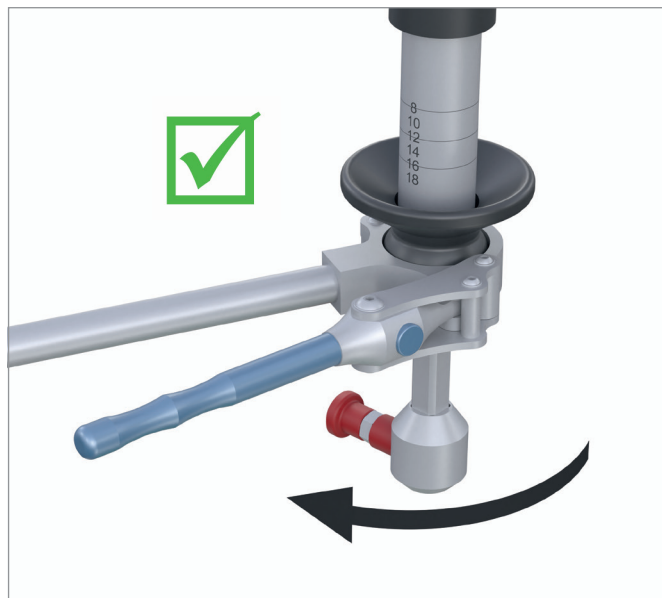
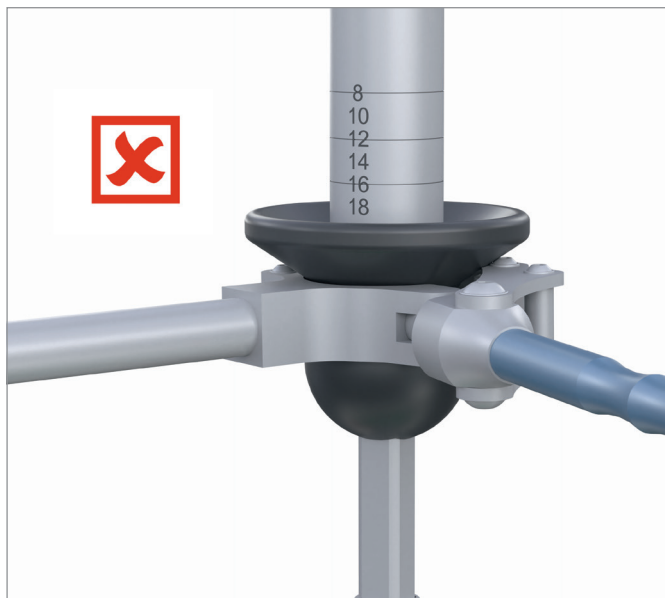


*Patikrinkite, ar įtempimo valdiklis tvirtai ir saugiai pritvirtintas.*


## „fasciotens®Hernia“ siūlų laikiklio pritvirtinimas ir nuėmimas

Norėdami pritvirtinti siūlų laikiklį prie įtempimo valdiklio, atlikite šiuos veiksmus:



1. Ištraukite raudoną fiksavimo varžtą ir pasukite jį 90° (užfiksuojuama atviroje padėtyje)

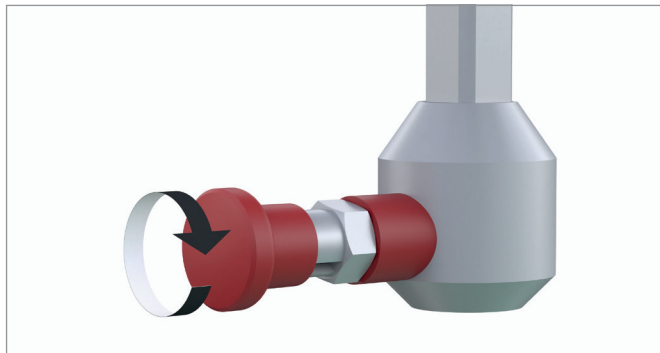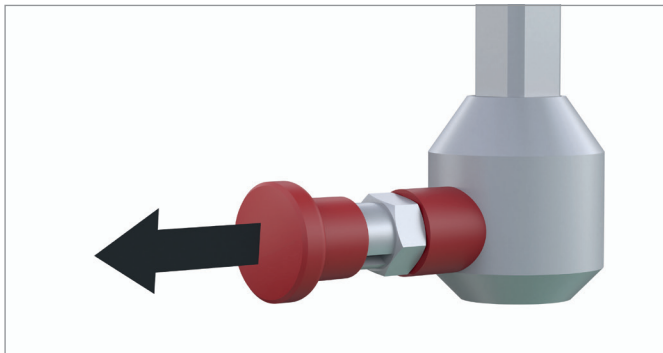

2. Įdėkite siūlų laikiklį į įleidimo angą iš apačios.

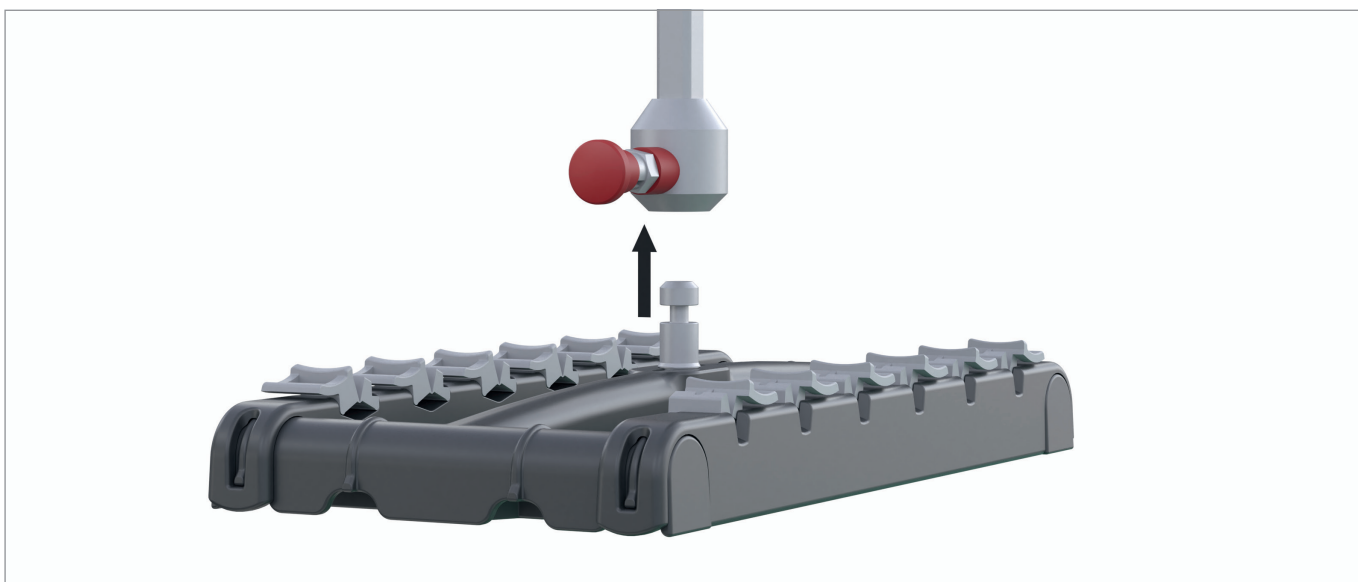

3. Pasukite fiksavimo varžtą atgal į uždarymo padėtį, kad jį užfiksuojumėte.

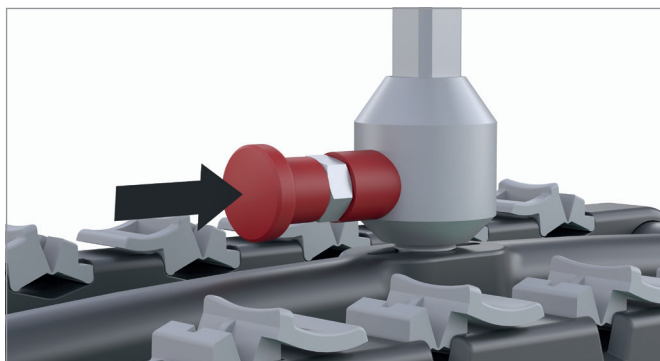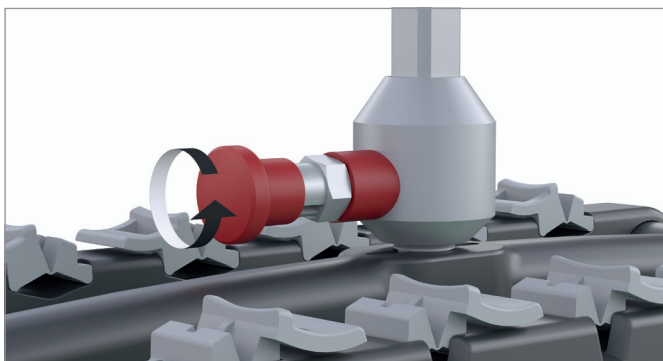





Įsitikinkite, kad siūlų laikiklis yra visiškai įkištas į įleidimo angą ir kad fiksavimo varžtas yra tinkamai įsuktas.



Patikrinkite, ar siūlų laikiklis tvirtai įstatytas į įleidimo angą, traukdami jį žemyn vidutine jėga. Siūlų laikiklis neturi atsiskirti nuo įleidimo angos.



Siūlų laikiklis visada turi būti išlygiuotas lygiagrečiai naudojimo vietai.

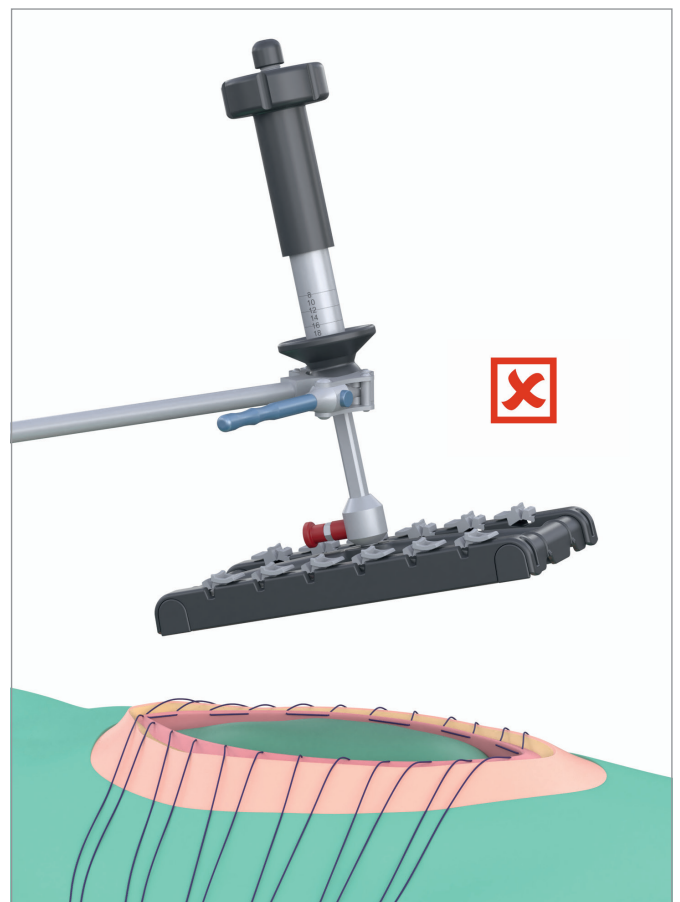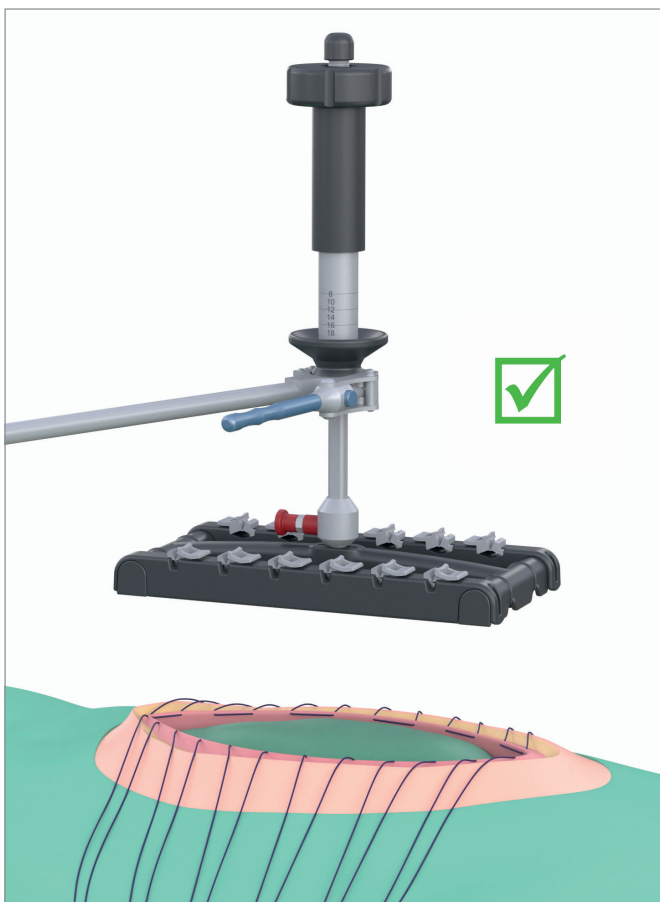

fasciotens®Hernia jau paruošta naudoti.



Įtempiant reikia pasirūpinti, kad pilvo organai ir poodiniai audiniai būtų apsaugoti keliais drėgnais pilvo rankšluosčiais.

## Išankstinio įtempimo valdiklis



Ruošiantis įtempti, rekomenduojama įtempiamus siūlus išlyginti skersai, kad būtų galima paprastai įtempti siūlus įstrižai.


**1. Įvertinkite atstumą tarp siūlų laikiklio ir paciento.** Siūlų laikiklis turi būti kuo arčiau paciento, vengiant tiesioginio sąlyčio su žaizda. Jei reikia, sureguliuokite „fasciotens®Carrier“ skersinio aukštį. Laikykitės „fasciotens®Carriers“ naudojimo instrukcijų.





Rekomenduojamas bent 10 cm atstumas nuo žaizdos.




Norint atlikti išankstinį įtempimą, reikalingas antras asmuo.

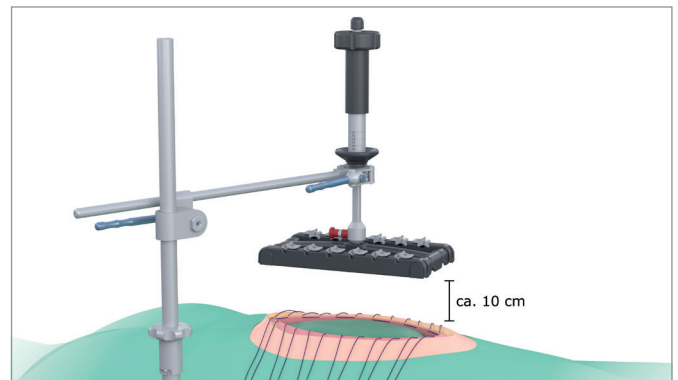

**2. Dabar nuspausdami rankratį žemyn ir laikydami nuspaustą, įtempimo valdiklį įtempkite iki maždaug 14 kg.** Tada įtempkite keturis kampinius siūlus siūlų laikiklyje. Tą patį atlikite su kitais parodytais siūlais.

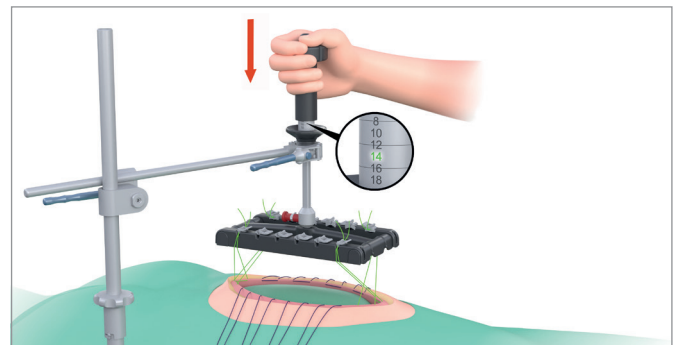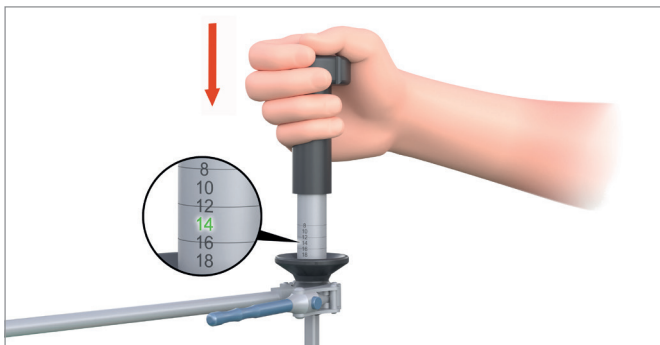

**3. Įtempus visus 12 įtempiamų siūlų, išankstinį įtempimą reikia atsargiai atleisti.**

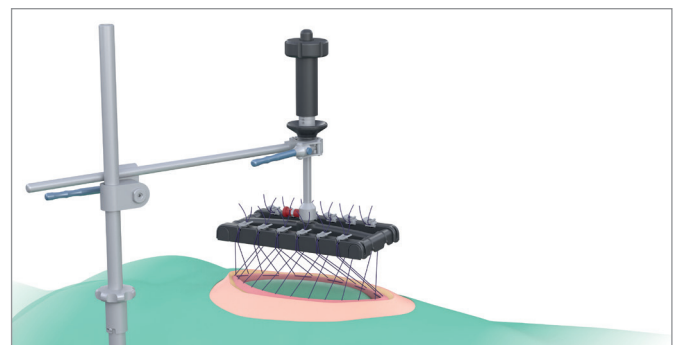

Kol visi siūlai nėra įtempti siūlų laikiklyje, išankstinio įtempimo negalima atleisti. Įtempus visus įtempiamus siūlus, svarbu atsargiai atleisti įtempimą.




*Įtempimo jėga iš pradžių visada turėtų būti apie 14 kg. Jei atleidus išankstinį įtempimą įtempimo jėga sumažėja, rekomenduojama įtempimą grąžinti iki 14 kg (paspaudus rankratį) ir vėl įtempti siūlus.*

## Siūlo įtvirtinimas ir išėmimas iš siūlų laikiklio



Pilvo sienos / fascijos siūlai fiksuojami siūlų laikiklyje, kaip nurodyta toliau.

1. Įkiškite sukryžiuotus įtempiamus siūlus tempdami į viršų ir į atvirą spaustuko angą.

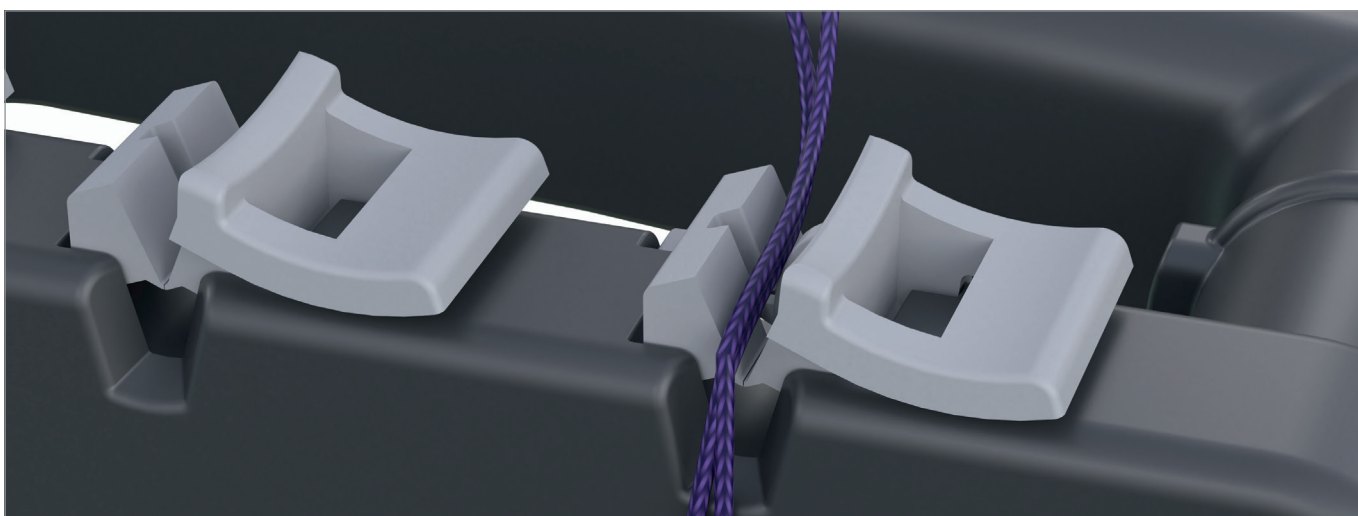



*Būtina užtikrinti, kad siūlai visada būtų nukreipiami iš išorės per hipomochlioną į spaustukus.*

2. Uždarykite spaustuką paspausdami spaustuko centrą.

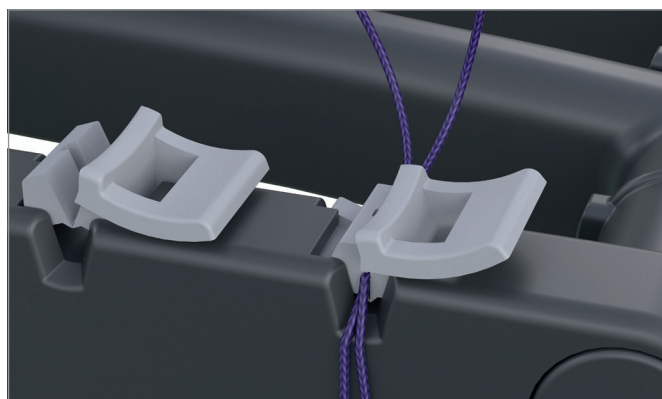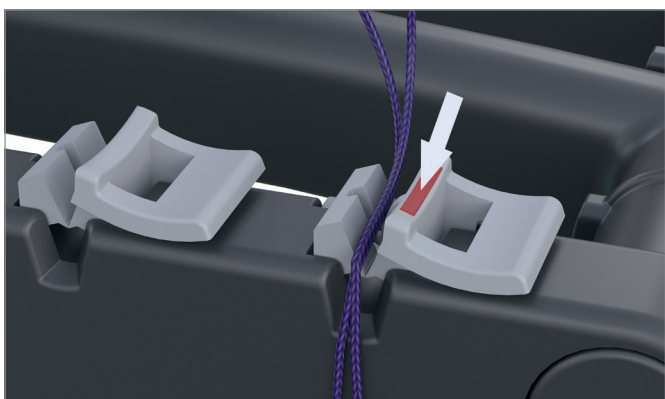

3. Atlikite 1 ir 2 veiksmus iš viso dvylika kartų su visais siūlais, kurie anksčiau buvo ant fascijos.

**4. Jei reikia, iš naujo įtempkite visus siūlus, kad visi būtų vienodai įtempti.**

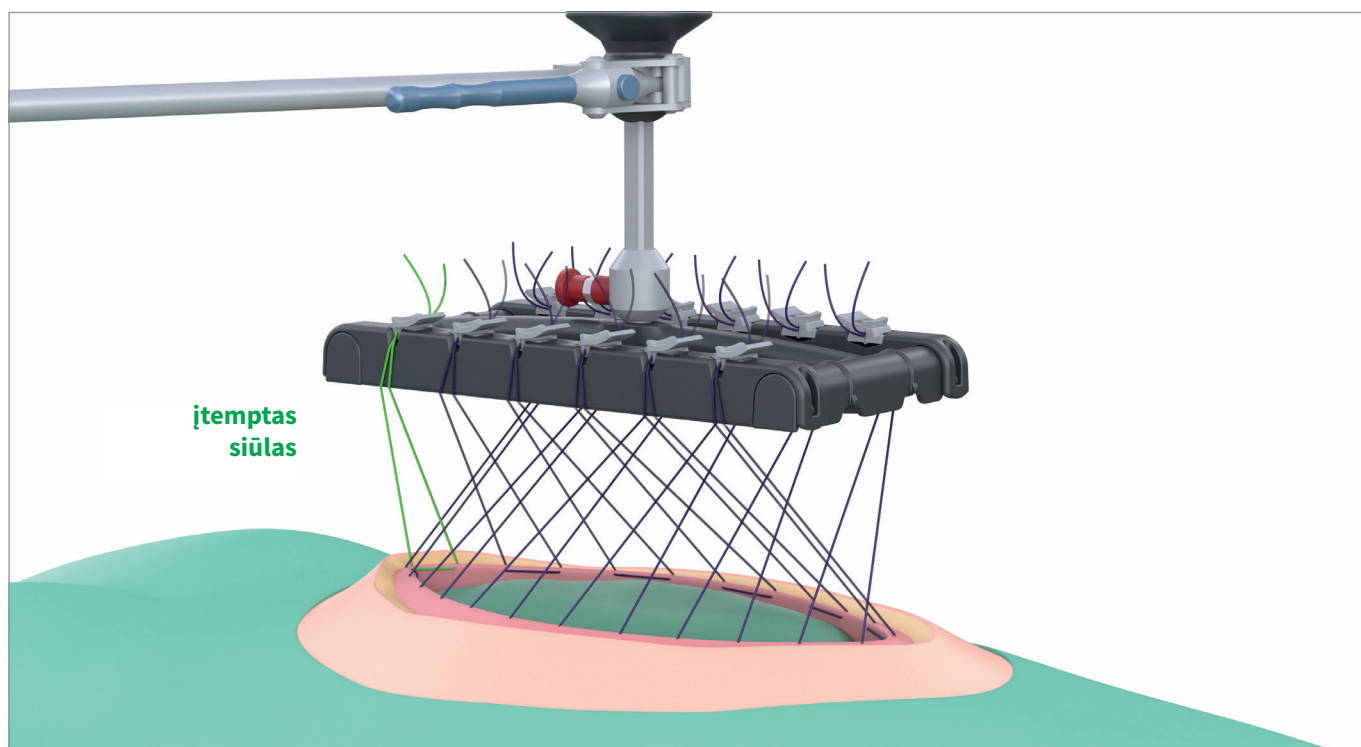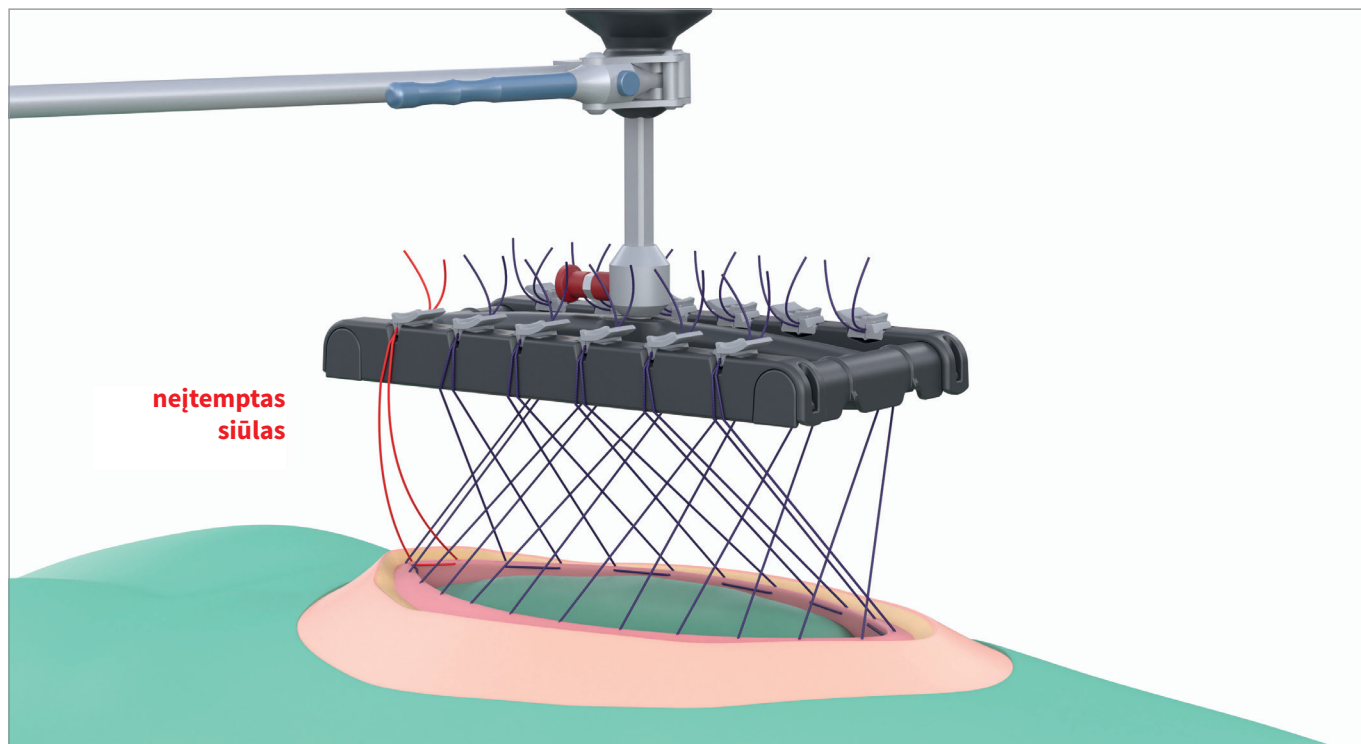

*Įtempiant pasiektą atstumą galima vizualizuoti iš pradžių pažymėjus siūlus, pavyzdžiui, naudojant spaustukus.*




## Įtempimo jėgos reguliavimas

Įtempimo jėga reguliuojama juodu rankračiu. Norėdami padidinti įtempimo jėgą, pasukite rankratį pagal laikrodžio rodyklę. Galima naudoti iki 20 kg įtempimo jėgą. Nustatytą įtempimo jėgą galima stebėti naudojant integruotą skalę.



*Taikomos įtempimo jėgos reguliavimas nustačius įtempimą priklauso nuo paciento anatominių būklių, todėl reguliuoti reikia pagal gydančio gydytojo nurodymus.*


Norėdami sumažinti įtempimo jėgą, atitinkamai pasukite rankratį prieš laikrodžio rodyklę.

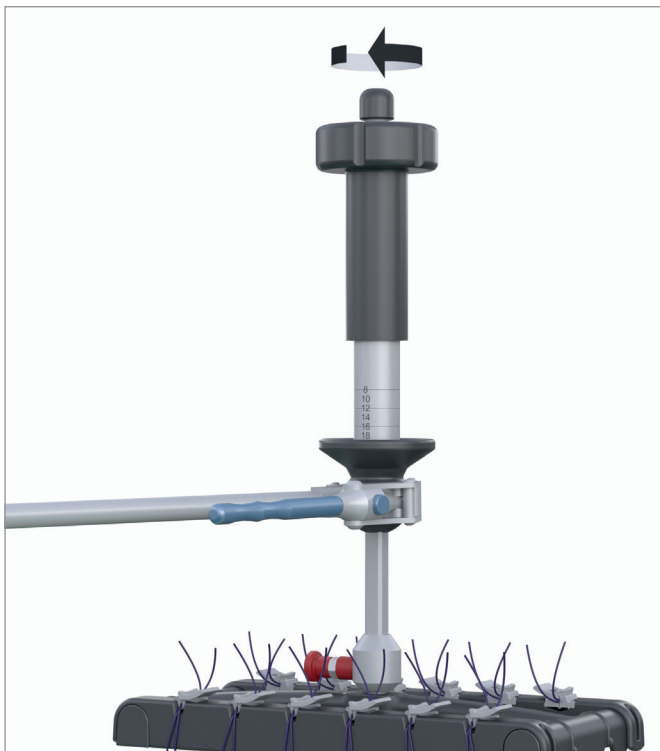

Pilvo siena / fascija įtempinama vertikaliai įstrižai. Naudojant fasciotens®Hernia, įtempimas tolygiai ir kontroliuojamai paskirstomas per siūlus ant fascijos arba pilvo sienos ir turi išlikti maždaug 30 minučių.

Įtempimo valdiklio įtempį reikia reguliariai tikrinti ir, jei reikia, sureguliuoti.

Kai kurie siūlai gali būti įtempti greičiau, todėl gali prireikti iš naujo įtempti atskirus siūlus. Kas 2 minutes reikia patikrinti, ar visi siūlai pakankamai įtempti, ir, jei reikia, dar įtempti.

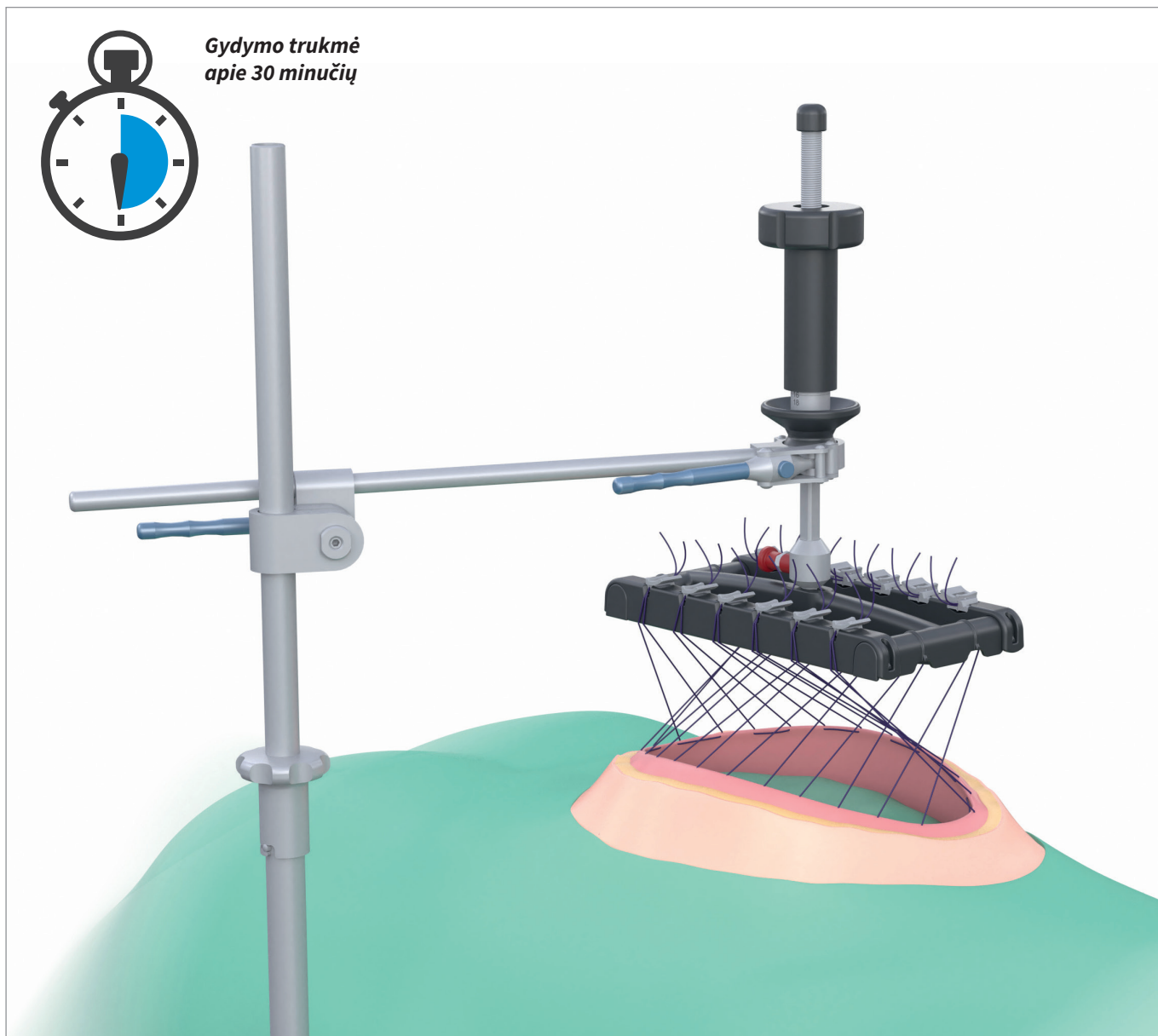



*Gydymo metu dėl pilvo sienos / fascijos įtempimo gali sumažėti įtempimo jėga, kurią matote skalėje. Norėdami sureguliuoti įtempimo jėgą, naudokite rankratį, kaip aprašyta pirmiau.*

## Gaminio struktūra



Atkreipkite dėmesį, kad atlaisvinant siūlų laikiklį, tikslinėje vietoje gali būti didelė jėga. Dėl šios priežasties pacientų saugai svarbu laikytis nurodytos išmontavimo procedūros.

1. Kiek įmanoma **sumažinkite įtempimo jėgą sukdami rankratį prieš laikrodžio rodyklę.**
2. **Viena ranka tvirtai užfiksuoja siūlų laikiklį**, kad jis nenukristų atsilaisvindamas.
3. **Ištraukite raudoną fiksavimo varžtą.** Siūlų laikiklį galima nuimti traukiant žemyn.

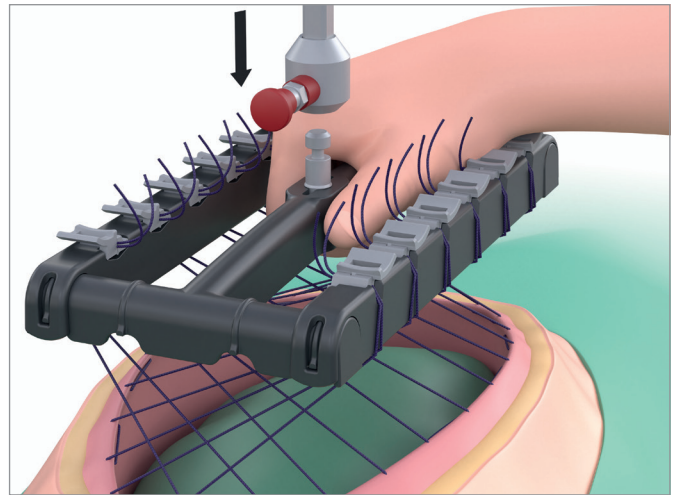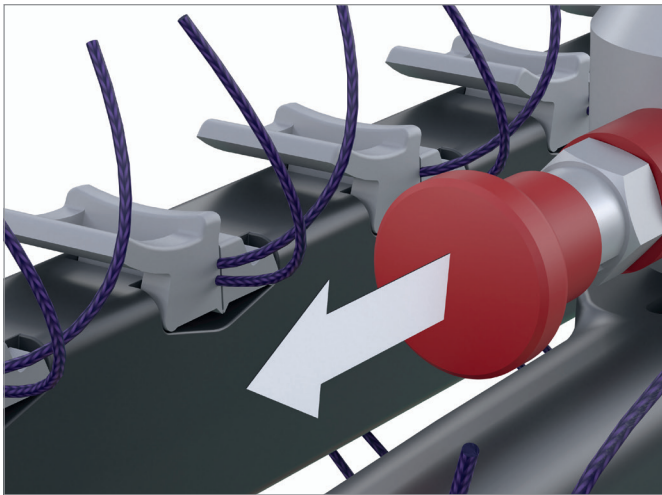

Užtikrinkite, kad siūlų laikiklis nenukristų ant tikslinės vietos ir niekada nesiliestų su žaizda.

4. **Atlaisvinę siūlų laikiklį, toliau laikykite jį viena ranka** virš tikslinės vietos neįtempę.
5. **Išimkite įtempiamus siūlus iš spaustukų.**
6. **Viena ranka pritvirtinkite įtempimo valdiklį** ir atidarykite „fasciotens®Carrier“ rutulinį laikiklį. Įtempimo valdiklį galima pastumti aukštyn.
7. **Dabar nuimkite „fasciotens®Carrier“ nuo operacinio stalo.**

## Pakartotinis apdorojimas / sterilizavimas

Produktas skirtas naudoti vieną kartą, todėl jo negalima pakartotinai sterilizuoti ir apdoroti. Negalima ignoruoti likusios infekcinės medžiagos ir pažeisto gaminio (pvz., lūžusios medžiagos), kuris gali kelti atitinkamą pavojų pacientui pakartotinai apdorojant. Todėl gamintojas negali garantuoti medicinos prietaiso veikimo ir saugos, kai jis naudojamas pakartotinai.

## Šalinimas

Pasibaigus gydymui, profesionaliai išmeskite gaminį arba naudokite perdirbimo sistemą. Pakuotę galite išmesti kartu su popieriumi ir buitinėmis atliekomis. Būtina laikytis visų šalinimo priemonių nacionalinių taisyklių ir šalinimo gairių.

## Garantija

Teisinė mūsų gaminių garantija yra 24 mėnesiai. Jei per šį laikotarpį pastebėjote pradinį gaminio defektą, tiesiogiai praneškite mūsų pagalbos tarnybai.



*fasciotens®Hernia gaminio pakartotinis apdorojimas, pakartotinis sterilizavimas ir vėlesnis pakartotinis naudojimas prieštarauja numatytam naudojimui. Tokiu atveju jokia „fasciotens GmbH“ garantija ir atsakomybė nustoja galioti.*



*Esant defektų, kurie gali kelti pavojų pacientams, darbuotojams ar trečiosioms šalims, prietaiso negalima toliau naudoti ir jį reikia pakeisti.*














*Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, išorinių mechaninių poveikių, transportavimo pažeidimų, netinkamo naudojimo, taip pat pašalinių asmenų atliekamiems darbams, ir „fasciotens GmbH“ neprisiima atsakomybės.*

## Pagalba

Jei reikia, jei turite kokių nors problemų ar klausimų, susisiekite su mūsų pagalbos tarnyba el. paštu (**support@fasciotens.de**) arba susisiekite su mumis **telefonu +49 (0)221 17738 500**.

## Naudojami grafiniai simboliai

Grafiniai simboliai	Ženklimas
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Produkto numeris“
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Gamybos partijos numeris, partija“
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Gamintojo pavadinimas ir adresas“
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Sterilizuota etileno oksidu“
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Laikykitės naudojimo instrukcijų“
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Nesterilizuoti pakartotinai“
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Nenaudoti pakartotinai“
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Nenaudoti, jei pakuotė pažeista“
	Gaminių, kurie pateikiami į rinką, ženklimas pagal atitinkamus Europos teisinius reikalavimus.
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Laikyti sausiai“
	Ženklimas pagal ISO 15223-1 standartą. Simbolis „Saugoti nuo saulės šviesos“

## Įspėjimų žodynėlis

Skirius	Įspėjimas	Puslapis
<b>Paskirtis, indikacijos ir kontraindikacijos</b>	Gaminys buvo patvirtintas naudoti tik su „fasciotens®Carrier“. Gamintojas neleidžia derinti su kitomis įtempimo sistemomis.	6
	Naudojimą gali riboti vietiniai veiksniai naudojimo srityje ir bendra paciento būklė!	6
<b>Gaminio struktūra</b>	Jei prieš naudojant „fasciotens®Hernia“ pastebima, kad sterili pakuotė yra pažeista, gaminio naudoti nebegalima. Kreipkitės į gamintoją.	8
<b>Paciento paruošimas</b>	Būtina naudoti polifilamentinių siūlų medžiagą (USP 2), kad siūlai tinkamai laikytųsi.	9
<b>Surinkimas ir sulgyjimas</b>	Patikrinkite, ar įtempimo valdiklis tvirtai ir saugiai pritvirtintas.	11
<b>„fasciotens®Hernia“ siūlų laikiklio pritvirtinimas ir nuėmimas</b>	Įsitikinkite, kad siūlų laikiklis yra visiškai įkištas į įleidimo angą ir kad fiksavimo varžtas yra tinkamai įsuktas.	13
	Patikrinkite, ar siūlų laikiklis tvirtai įstatytas į įleidimo angą, traukdami jį žemyn vidutine jėga. Siūlų laikiklis neturi atsiskirti nuo įleidimo angos.	13
	Siūlų laikiklis visada turi būti išlygiuotas lygiagrečiai naudojimo vietai.	13
	Įtempiant reikia pasirūpinti, kad pilvo organai ir poodiniai audiniai būtų apsaugoti keliais drėgnais pilvo rankšluosčiais.	13
<b>Išankstinio įtempimo valdiklis</b>	Siūlų laikiklis niekada neturi liestis su paciento žaizdos paviršiumi ar organais. Rekomenduojamas bent 10 cm atstumas nuo žaizdos.	14
	Kol visi siūlai nėra įtempti siūlų laikiklyje, išankstinio įtempimo negalima atleisti. Įtempus visus įtemptiamus siūlus, svarbu atsargiai atleisti įtempimą.	14
<b>Gaminio struktūra</b>	Patikrinkite, ar visi įtemptiami siūlai yra panašiai įtempti. Jei reikia, atskirus įtemptiamus siūlus priveržkite iš naujo. Tęskite, kaip aprašyta pirmiau.	19
	Iš pradžių reguliuojant juodas rankratis visada turi būti pasuktas iki galinio dangtelio. Iš pradžių reguliuojant virš varžto galvutės neturėtų būti matomas juodas galinis dangtelis.	19
<b>Garantija</b>	„fasciotens®Hernia“ gaminio pakartotinis apdorojimas, pakartotinis sterilizavimas ir vėlesnis pakartotinis naudojimas prieštarauja numatytam naudojimui. Tokiu atveju jokia „fasciotens GmbH“ garantija ir atsakomybė nustoja galioti.	21
	Esant defektų, kurie gali kelti pavojų pacientams, darbuotojams ar trečiosioms šalims, prietaiso negalima toliau naudoti ir jį reikia pakeisti.	21
	Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, išorinių mechaninių poveikių, transportavimo pažeidimų, netinkamo naudojimo, taip pat pašalinių asmenų atliekamiems darbams, ir „fasciotens GmbH“ neprisiima atsakomybės.	21

# fasciotens



**Įmonės adresas:** fasciotens GmbH, Moltkeplatz 1, D-45138 Essen, Vokietija  
Telefonas +49 (0)201 99 999 630, faksas +49 (0)201 99 999 639, el. paštas: info@fasciotens.de

**CE 0044**